



Алгоритм розморожування холодильника для зберігання вакцин



Розморожуйте холодильник за графіком або коли товщина льоду перевищує 0,5 см



1. Вийміть усі вакцини та перемістіть їх до іншого холодильника або термоконтейнера з холодоелементами




2. Вимкніть електричне живлення холодильника




3. Залиште дверцята відкритими й дочекайтеся, поки лід розтане. Ніколи не намагайтеся видалити лід ножем: це може пошкодити холодильник. Щоб лід швидше розтанув, можна поставити всередину холодильника ємність з гарячою водою і закрити дверцята



4. Очистьте внутрішню частину холодильника та ущільнення дверцят чистою вологою ганчіркою

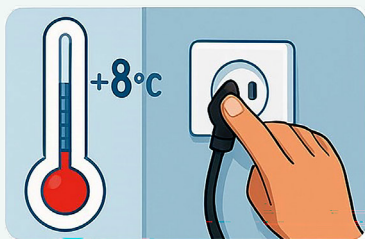

5. Перезапустіть холодильник. Не регулюйте термостат (якщо він є)

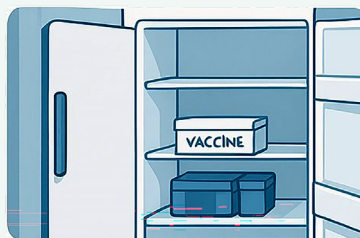

6. Дочекайтеся, коли температура в основній секції опуститься до $+8^{\circ}\text{C}$ або нижче, і лише тоді розмістіть у відповідних місцях вакцини, розчинники та холодоелементи. Пересвідчіться, що температура в холодильнику не опустилася нижче ніж $+2^{\circ}\text{C}$